

Patientengrößen/Satteltypen ergoselect 10/12

Das ergoselect 10/12 wird ab Werk standardmäßig mit der Kombination „Sattel schmal – Einsteck-Halterung normal“ ausgeliefert. Folgende Sattelkombinationen sind zusätzlich als Zubehör erhältlich:

Sattel breit – Einsteck-Halterung normal (erg705.979)

Sattel breit – Einsteck-Halterung extra kurz (erg705.985)

Sattel schmal – Einsteck-Halterung extra kurz (erg705.883)

Alle Satteltypen können mit der Sattelhalterung in die Sattelführungsschiene des Liege-Ergometers eingesteckt werden.

Durch die Form der Einsteck-Halterung und durch das Verschieben des Sattels lässt sich die Liege-Position des Patienten immer exakt an die Pedaleinheit anpassen.

Zwischen der verlängerten Achse des Oberkörpers und dem Oberschenkel soll bei durchgetretenem Pedal ein Winkel von ca. 10° entstehen.

Folgende Beinlängen wurden bei Messungen ermittelt (Strecke a in Abb.):

Sattel breit – Einsteck-Halterung normal: a = 77 cm

Sattel breit – Einsteck-Halterung extra kurz: a = 64 cm

Sattel schmal – Einsteck-Halterung extra kurz: a = 64 cm

Wichtiger Hinweis!



Entscheidend für die optimale Liege-Position des Patienten ist die Beinlänge (nicht die Körpergröße!), die – in Kombination mit dem optimalen Sattel – einen großen Spielraum für unterschiedliche Körpergrößen ermöglicht.

