

## Installation USB Treiber für ergoselect II Ergometer


### USB INTERFACE

Bevor die USB Schnittstelle der ergoselect II Ergometer verwendet werden kann, muß im PC ein Treiber installiert werden, der eine virtuelle COMx Schnittstelle im PC einrichtet.

### TREIBER INSTALLATION (VIRTUELLE COMx)

Zur Installation werden Administrator-Rechte benötigt.

- PC und Monitor einschalten
- Alle laufenden Programme (auch im Hintergrund) beenden
- Die USB Treiber CD in das CD-Laufwerk einlegen.  
Sollte die Installation nicht automatisch starten, das Programm „setup.exe“ im Windows Explorer starten.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm  
- sollte eine Warnung für ein nicht identifiziertes Programm erscheinen, die Installation bestätigen..
- Auf „Finish“ klicken, um die Installation des Treibers zu starten.
- Das ergoselect Ergometer mit einem USB Kabel mit dem PC verbinden und das Ergometer einschalten:  
- das ergoselect Ergometer wird automatisch erkannt und der Treiber wird geladen („Silicon Labs CP 210x“).
- Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen
- Die CD aus dem Laufwerk entnehmen.

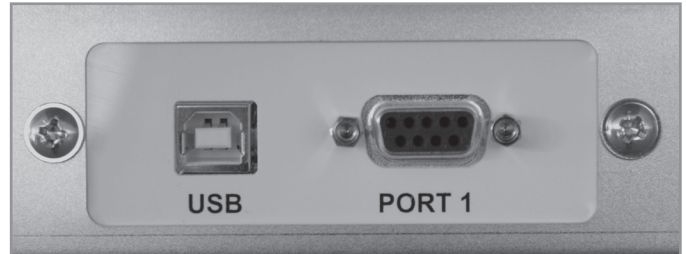

### USB INTERFACE ÜBERPRÜFEN

- Das ergoselect Ergometer mit einem USB Kabel mit dem PC verbinden und das Ergometer einschalten.
- Den WINDOWS „Device manager“ starten.
- Auf „COM & LPT“ doppelklicken, um alle Verbindungen anzuzeigen.
- Falls ein SB Serial Port („Silicon Labs CP 210x USB to UART Bridge“) zugewiesen ist, ist die Installation in Ordnung.  
Merken Sie sich den zugewiesenen COM Port - dieser muss in den Einstellungen des PC-Programms verwendet werden, das das Ergometer ansteuern soll.
- Alle offenen Programmfenster schliessen